

# Mepilex® UP

## CAS CLINIQUE N°2

### Ulcère de jambe veineux

Dr David Valancogne  
Médecin plaies et cicatrisation  
Clinique du parc - Lyon



### Femme de 84 ans

Ulcère de jambe veineux  
sus-malléolaire sur la face  
externe de la jambe gauche

- Ancienneté de la plaie : 2 mois
  - Traitement antérieur : UrgoStart Plus Border
- Aucun dispositif de compression

### Antécédents du patient

- IVC, Diabète (Sitagliptine, Dapagliflozine, Insuline Glargine)
- HTA/Insuffisance cardiaque (Furosémide, Spironolactone, Warfarine)
- Hyperthyroïdie (Levothyroxine)

### Protocole

- Pansement primaire Mepilex Up renouvelé tous les jours
- Ajout d'une fixation sous compression par Tubifast entre J28 et J60
- Patient observant au port de la compression veineuse (ROSIDAL SYS)

J0  
à  
J60



+ compression  
veineuse

Renouvellement

tous les  
jours  
en moyenne

## Évolution de la plaie

J0

8 cm<sup>2</sup>



40%

Fibrine

60%

Bourgeonnement

J28

33% de réduction  
de la surface 5,2 cm<sup>2</sup>



20%

Fibrine

80%

Bourgeonnement

J60

76% de réduction  
de la surface 2 cm<sup>2</sup>



100%

Bourgeonnement

## Bénéfices

- Réduction du volume d'exsudat
- Réduction de la douleur
- Surface de la plaie réduite de 76%
- Relance du processus de cicatrisation

Mölnlycke, Mepilex Up sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Mölnlycke Health Care. CE2797. Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës, sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. Prix LPPR = Prix limite de vente.

Lire la notice avant toute utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Mölnlycke Health Care CS 70205 -  
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex -  
SIRET : 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472 -  
communication.france@molnlycke.com - www.molnlycke.fr  
© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care



Documents  
de référence  
et liens utiles

  
**Mölnlycke®**