


# Mepilex® Border Protect Sacrum

Safetac  
TECHNOLOGY



## Mode d'emploi

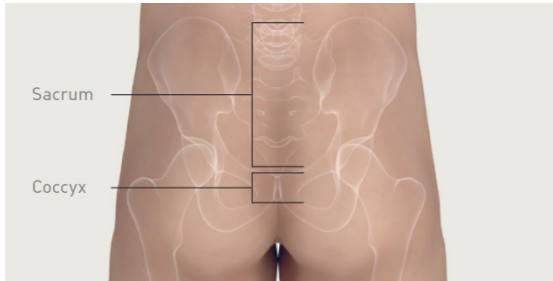

1. Zone à protéger.  
Évaluez l'anatomie du patient pour déterminer le bon positionnement du pansement.



3. Écartez les fesses puis appliquez le pansement sur la zone sacrée et sur le sillon interfessier avec la base du pansement pour couvrir la zone du coccyx.



5. Positionnement du pansement.



2. Après avoir séché et nettoyé soigneusement le pourtour de la plaie, retirez le feuillet protecteur au centre du pansement.



4. Retirez les films protecteurs latéraux du sillon interfessier successivement puis lissez doucement le pansement de chaque côté du sillon.



6. Appuyez sur le pansement pour vous assurer qu'il soit entièrement au contact de la peau.

**Mepilex® Border Protect Sacrum** : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositif médical. L'organisme notifié de ces produits est BSI (British Standards Institution). CE 2797.

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

**Réclamations qualité produits : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)**

Service clients & renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 – Fax : 03 20 12 25 46  
Distributeur : Mölnlycke Health Care – CS 70205 – 13 allée du Château Blanc – 59445 Wasquehal cedex  
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE6402 52 Göteborg, Sweden – Tél : +46 31 722 30 00 – Fax: +46 31 722 34

[www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)  
©Copyright [2019] Mölnlycke Health Care

  
**Mölnlycke®**