

# Conseils de pose

Mepilex<sup>®</sup> Border Flex

# Pose sur le genou

## Mepilex® Border Flex Carré - 17.5 x 23 cm



### Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement et ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 3** La tenue du pansement est sécurisée.

# Pose sur le coude

Mepilex® Border Flex Oval - 10 x 12.5 cm



## Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Oval appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement et ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 3** La tenue du pansement est sécurisée.

# Pose sur le tendon d'Achille

Mepilex® Border Flex Carré - 7.5 x 8.5 cm



## Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement et ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur.
- 3** Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 3** La tenue du pansement est sécurisée.

# Pose sur le côté du pied

Mepilex® Border Flex Carré - 7.5 x 8.5 cm



## Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement et ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur.
- 3** Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau.  
Ne pas étirer.
- 3** La tenue du pansement est sécurisée.

# Pose sur l'épaule

Mepilex® Border Flex Oval - 13.5 x 16.5 cm



## Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Oval appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement et ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 3** La tenue du pansement est sécurisée.



## Un conseil pour une plaie ?

### Hotline Plaies & Cicatrisation

Contactez votre IDE Nord référente : **06 33 09 67 53**

Contactez votre IDE Sud référente: **06 33 09 02 47**

Distributeur : Mölnlycke Health Care  
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal Cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden  
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

Service clients & Renseignements produits :  
Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

**Réclamation qualité produits : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)**

**[www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)**

© Copyright 2020

Mölnlycke Health Care et Mepilex, sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.  
Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 2797. L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).

**Mölnlycke®**

The logo consists of three green circles of varying sizes arranged in a cluster above the brand name "Mölnlycke" in a bold, green, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).