

## PATIENT DE 39 ANS

- Présentant une déchirure cutanée de grade 2 (Perte partielle du lambeau tissulaire) localisée sur le coude évoluant depuis 4 semaines

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Non connus

## PROTOCOLE DE SOINS



Mepilex® Border Flex Carré OU Mepilex® Border Flex Oval



Renouvellement tous les 3 à 4 jours en moyenne

## EVOLUTION DE LA PLAIE

J0



- Surface initiale de 1.68 cm<sup>2</sup>
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Présence d'un érythème périlésionnel
- Absence d'exsudat

J4



- Réduction de la surface de 66% (0.4 cm<sup>2</sup>)
- Disparition de l'érythème périlésionnel
- Absence d'exsudat

J12



- Plaie résiduelle (< 0.5 cm<sup>2</sup>)
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat
- Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex Carré et cicatrisation complète 6 jours plus tard

## ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm).
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré et Oval se conforment très bien à la plaie, sont très faciles à appliquer et ont une très bonne tenue en place.