

Procédure d'enfilage des casaques chirurgicales

L'ouverture de la casaque chirurgicale doit être réalisée dans un lieu sans risque de contamination.



1. Placez les deux mains dans les emmanchures. Tenez la casaque chirurgicale éloignée du corps et laissez-la se déplier complètement.



2. Glissez les deux mains et avant-bras dans les emmanchures et les manches. Gardez les mains à hauteur d'épaules, éloignées du corps.



3a. En cas d'enfilage ouvert des gants, tirez la manchette jusqu'au niveau du pouce.

3b. En cas d'enfilage fermé, poussez les mains jusqu'au bout de la manchette.



4. L'infirmier de bloc opératoire doit enfiler la casaque chirurgicale sur les épaules, en veillant à ne toucher que l'intérieur de la casaque.



5. Puis fixer le haut de la casaque au niveau de la nuque.



6. Et enfin nouer les liens intérieurs de la casaque.



7. Après avoir enfilé les gants, prenez la carte de transfert avec les deux mains. Séparez le lien gauche du carton de transfert et gardez-le dans la main gauche.



8. Donnez le carton de transfert à l'infirmier de bloc opératoire, puis tournez de trois-quarts de tour vers la gauche tandis que l'infirmier tend le lien extérieur jusqu'à ce que la totalité de sa longueur soit libérée.



9. Récupérez le lien extérieur en le détachant du carton de transfert tenu par l'infirmier de bloc opératoire et nouez-le avec l'autre lien extérieur du côté gauche.

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI).

Organisme notifié 2797.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU02622004.