

Trousse cardiovasculaire BARRIER®



- Imperméable pour empêcher les fuites et aider à protéger le patient contre les infections
- Champ vasculaire en U avec cache périnée
- Champ spécifique à la chirurgie thoracique avec film à inciser intégré
- Poches à instruments et de recueil intégrées
- Absorption élevée pour une zone d'intervention sèche
- Couche confort pour le patient



1. Vous pouvez commencer en plaçant un champ de table sous les jambes du patient. Placez le champ vasculaire inférieur sous les jambes du patient. Dépliez le champ sur les côtés du patient.



2. Fixez le cache périnée intégré.




3. Enveloppez les pieds du patient avec les chaussettes.



4. Le champ latéral adhésif peut être utilisé comme une protection supplémentaire pour la zone du cou. Ôtez la feuille de protection du champ cardiovasculaire.



5. Placez le champ au centre de la poitrine du patient. Dépliez les côtés du champ.

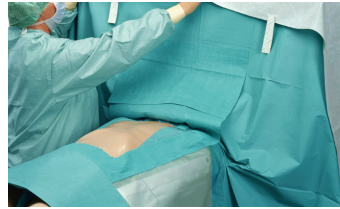


6. Dépliez le premier pli UNIQUEMENT des parties inférieures du champ thoracique. Dépliez la partie supérieure du champ au-dessus de l'arceau d'anesthésie. Les bandes adhésives peuvent être fixées du côté de la zone d'anesthésie.



7. Après l'excision chirurgicale de la greffe veineuse, dépliez la partie inférieure restante du champ thoracique.



8. La fixation de la poche à bistouri et des passe-tubulures complète le drapage.

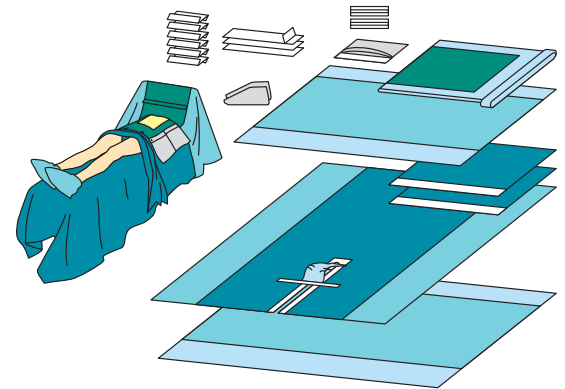

N°. Réf.	Codes stériles	Taille (cm)	Condit. int. / Condit. ext
694640	Trousse cardiovasculaire : 1 Housse de Mayo renforcée 6 Serviettes absorbantes 1 Champ de table 1 Poche à bistouri 2 Passe-tubulures en velcro 3 Bandes adhésives 2 Chaussettes vertes 2 Chaussettes transparentes 2 Champs latéraux adhésifs 1 Champ vasculaire avec cache périnée, renfort avec U : 20 x 102 cm 1 Champ thoracique, renfort avec film à inciser 32 x 40 cm 1 Champ de table	79 x 145 18 x 25 150 x 190 33 x 38 2,5 x 33 9 x 49 36 x 28 36 x 28 75 x 75 200 x 260 200/300 x 330 150 x 240	3/6

Le contenu de toutes les trousse stériles est également disponible dans les trousse sur mesure Mölnlycke®.

N°. Réf.	Composants des trousse sur mesure Mölnlycke®	Taille (cm)
988795	Champ vasculaire avec cache périnée, renfort avec U : 20 x 102 cm	200 x 260
966946	Champ thoracique, renfort avec film à inciser 32 x 40 cm	200/300 x 330

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.
Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com
Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55
Réclamations qualité : reclamation_qualite@molnlycke.com
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01
© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU03002007

