

BARRIER®

Trousse de césarienne



- Poche de recueil intégrée pour une gestion efficace des liquides
- Design tridimensionnel pour une protection complète
- Bord de la poche en mousse pour ajouter de la stabilité et aider à gérer les fluides
- Film à inciser ouvert transparent et extensible intégré pour une fixation sûre
- Imperméable pour empêcher les fuites et aider à protéger le patient contre les infections
- Champ monobloc, facile à mettre en place par une personne



1. Repérez le sens indiqué par le pictogramme. Retirez le feuillet de protection.



2. Centrez le drapage sur la patiente.



3. Dépliez d'abord le champ vers vous, puis dans la direction opposée.



4. Dépliez le champ vers les pieds de la patiente, puis vers sa tête.



5. Dépliez la poche de recueil. Retirez le papier crêpe et assurez-vous que le film adhésif soit correctement fixé sur la patiente.



6. Le drapage est maintenant terminé.

N°. Réf.	Codes stériles	Taille (cm)	Condit. int. / Condit. ext.
65040	Champ de césarienne, film à inciser 38 x 32 cm, ouverture 18 x 16 cm, avec feuille de crêpe	175/250 x 300	6/12
65043	Trousse de césarienne : 4 Serviettes absorbantes 1 Bande adhésive 1 Champ de recueil bébé 1 Champ de césarienne, film à inciser 38 x 32 cm, ouverture 18 x 16 cm 1 Champ de table 1 Feuille de crêpe	18 x 25 9 x 49 90 x 120 175/250 x 300 150 x 190 112 x 112	5/10
694135	Trousse de césarienne : 1 Housse de Mayo, zone absorbante 65 x 85 cm 4 Serviettes absorbantes 1 Bande adhésive 1 Champ de recueil bébé 1 Champ de césarienne, film à inciser 38 x 32 cm, ouverture 18 x 16 cm 1 Champ de table	79 x 145 18 x 25 9 x 49 90 x 120 175/250 x 300 150 x 190	4/8
694140	Trousse de césarienne : 4 Serviettes absorbantes 1 Bande adhésive 1 Champ de recueil bébé 1 Champ de césarienne, film à inciser 38 x 32 cm, ouverture 18 x 16 cm 1 Champ de table	18 x 25 9 x 49 90 x 120 175/250 x 300 150 x 190	5/10

N°. Réf.	Composant des trousse sur mesure Mölnlycke®	Taille (cm)
969673	Champ de césarienne, film à inciser 38 x 32 cm, ouverture 18 x 16 cm	175/250 x 300

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU02462004.

