

BARRIER® Trousse de main



- Design tridimensionnel pour une protection complète
- Absorption efficace pour une zone de travail maintenue au sec
- Imperméable pour empêcher les fuites et aider à protéger le patient contre les infections
- Champ monobloc, facile et rapide à mettre en place par une personne



1. Tenez le champ dans une position adéquate de manière à passer la main du patient dans l'ouverture.



2. Dépliez le champ et observez le pictogramme. La main schématisée illustre celle du patient.



3. Dépliez le champ vers vous, vous avez alors une protection entre vous et la main du patient. Dépliez ensuite le champ du côté opposé.



4. Dépliez le champ sur les côtés afin de couvrir la partie inférieure du corps et ensuite la tête.

N°. Réf.	Codes stériles	Taille (cm)	Taille de la zone absorbante (cm)	Condit. int. / Condit. ext.
60310	Champ de main, ouverture élastique 3,5 cm	150/370 × 280		7 / 14
60305	Trousse de main avec champ en T : 1 Champ de main, ouverture élastique 3,5 cm 1 Champ de table	150/370 × 280 150 × 190	75 × 190	6 / 12
60307	Trousse de main avec champ en T : 1 Champ de table 1 Champ de main, ouverture élastique 3,5 cm 1 Champ de table 1 Feuille de crêpe	100 × 150 150/370 × 280 150 × 190 100 × 100	75 × 150 75 × 190	5 / 10

Le contenu de toutes les trousse stériles est également disponible dans les trousse sur mesure Mölnlycke®.

N°. Réf.	Composant des trousse sur mesure Mölnlycke®	Taille (cm)
70310	Champ de main, ouverture élastique 3,5 cm élastique	150/370 × 280

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.

Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex

Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com

Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55

Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU01912004.

