

PATIENT DE 62 ANS

- Présentant un ulcère mixte localisé sur le gros orteil évoluant depuis 6 mois

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Insuffisance veineuse
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- Amputation de 4 orteils
- Tabagisme

PROTOCOLE DE SOINS

Mepilex® Border Flex Carré **OU** Mepilex® Border Flex Oval

Renouvellement **tous les 2 jours** en moyenne

EVOLUTION DE LA PLAIE

Temps	Observations cliniques	Composition de la plaie (%)
J0	<ul style="list-style-type: none"> • Surface initiale de 32cm² • Absence de signes cliniques d'infection locale • Peau périlésionnelle sèche et présence d'hyperkératose • Niveau d'exsudat faible 	5% fibrine 85% bourgeonnement 10% épidermisation
J15	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la surface de 34% (21 cm²) • Persistance de l'hyperkératose • Niveau d'exsudat modéré 	5% fibrine 80% bourgeonnement 15% épidermisation
J76	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la surface de 66% (11 cm²) • Peau périlésionnelle saine • Niveau d'exsudat important 	30% bourgeonnement 70% épidermisation

ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré et Oval se conforment bien à la plaie, sont faciles à appliquer et ont une bonne capacité à rester en place. Aucun signe de macération ou d'adhérence du pansement au lit de la plaie n'a été notifié.