

Mepilex® UP

CAS CLINIQUE N°1

Ulcère de jambe mixte à prédominance veineuse

Dr David Valancogne
Médecin plaies et cicatrisation
Clinique du parc - Lyon



Femme de 96 ans

Ulcère de jambe mixte à prédominance veineuse sus-malléolaire sur la face externe de la jambe gauche. Bénéficiant d'une compression veineuse

- Ancienneté de la plaie : 14 jours
- Traitement antérieur : hydrocellulaire

Antécédents du patient

- IVC
- AVC/Maladie vasculaire périphérique (Clopidogrel)
- HTA/Insuffisance cardiaque (Bisoprolol, Lercanipidine, Valsartan)
- Maladie pulmonaire chronique
- Dyslipidémie

Protocole

Pansement primaire Mepilex Up avec fixation par Tubifast renouvelé 1 fois par jour pendant 2 semaines puis 3 fois/semaine jusqu'à cicatrisation

J0
à
J35



+ compression
veineuse

Renouvellement

tous les
1 à 2
jours
en moyenne

Évolution de la plaie

J0

10,8 cm²



40%
Fibrine

60%
Bourgeonnement

J14

1,3 cm²



100%
Bourgeonnement

J35

Plaie complètement
fermée



100%
Epithélialisation

Bénéfices

- Réduction du volume d'exsudat
- Réduction de la douleur
- Plaie cicatrisée
- Pansement jugé efficace et facile d'utilisation

Mölnlycke, Mepilex Up sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Mölnlycke Health Care. CE2797. Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës, sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. Prix LPPR = Prix limite de vente.

Lire la notice avant toute utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Mölnlycke Health Care CS 70205 -
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex -
SIRET : 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472 -
communication.france@molnlycke.com - www.molnlycke.fr
© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care



Documents
de référence
et liens utiles

Mölnlycke®

Mepilex® UP

CAS CLINIQUE N°2

Ulcère de jambe veineux

Dr David Valancogne
Médecin plaies et cicatrisation
Clinique du parc - Lyon



Femme de 84 ans

Ulcère de jambe veineux
sus-malléolaire sur la face
externe de la jambe gauche

- Ancienneté de la plaie : 2 mois
- Traitement antérieur : UrgoStart Plus Border
- Aucun dispositif de compression

Antécédents du patient

- IVC, Diabète (Sitagliptine, Dapagliflozine, Insuline Glargine)
- HTA/Insuffisance cardiaque (Furosémide, Spironolactone, Warfarine)
- Hyperthyroïdie (Levothyroxine)

Protocole

- Pansement primaire Mepilex Up renouvelé tous les jours
- Ajout d'une fixation sous compression par Tubifast entre J28 et J60
- Patient observant au port de la compression veineuse (ROSIDAL SYS)

J0
à
J60



+ compression
veineuse

Renouvellement

tous les
jours
en moyenne

Évolution de la plaie

J0

8 cm²



40%
Fibrine

60%
Bourgeonnement

J28

33% de réduction
de la surface 5,2 cm²



20%
Fibrine

80%
Bourgeonnement

J60

76% de réduction
de la surface 2 cm²



100%
Bourgeonnement

Bénéfices

- Réduction du volume d'exsudat
- Réduction de la douleur
- Surface de la plaie réduite de 76%
- Relance du processus de cicatrisation

Mölnlycke, Mepilex Up sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Mölnlycke Health Care. CE2797. Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës, sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. Prix LPPR = Prix limite de vente.

Lire la notice avant toute utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Mölnlycke Health Care CS 70205 -
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex -
SIRET : 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472 -
communication.france@molnlycke.com - www.molnlycke.fr
© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care



Documents
de référence
et liens utiles

Mölnlycke®

Mepilex® UP

CAS CLINIQUE N°3

Ulcère de jambe veineux

Dr David Valancogne
Médecin plaies et cicatrisation
Clinique du parc - Lyon



Homme de 94 ans

présentant depuis 3 mois un
ulcère de jambe veineux sur
la face externe de la jambe droite.

- Traitement antérieur :
Algostéril
- Aucun dispositif
de compression

Antécédents du patient

- AVC (Aspirine)
- HTA
(Furosémide, Amlodipine/
Atorvastatine)
- Leucémie (Hydroxyurée)

Protocole

- Pansement primaire Mepilex Up avec fixation par Tubifast, renouvelé tous les jours jusqu'à J28 puis tous les deux jours jusqu'à cicatrisation
- Patient observant au port de la compression veineuse (ROSIDAL SYS)

J0
à
J60



compression
veineuse


Renouvellement

tous les
1 à 2
jours
en moyenne

Évolution de la plaie

J0

10,5 cm²

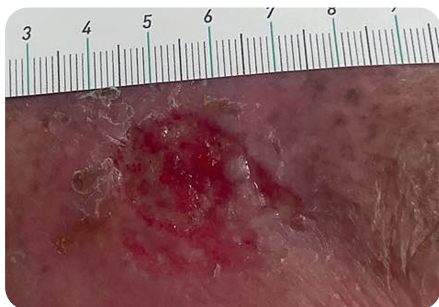


40%
Fibrine

60%
Bourgeonnement

J14

37% de réduction
de la surface 6,6 cm²

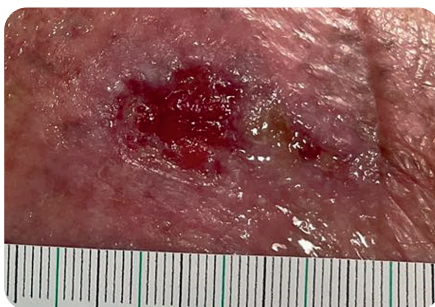

20%
Fibrine

80%
Bourgeonnement

J52

Plaie complètement
cicatrisée



100%
Epithélialisation

Bénéfices

- Réduction du volume d'exsudat
- Réduction de la douleur
- Plaie cicatrisée
- Pansement jugé efficace

Mölnlycke, Mepilex Up sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Mölnlycke Health Care. CE2797. Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës, sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. Prix LPPR = Prix limite de vente.

Lire la notice avant toute utilisation.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Mölnlycke Health Care CS 70205 -
13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex -
SIRET : 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472 -
communication.france@molnlycke.com - www.molnlycke.fr
© Copyright (2025) Mölnlycke Health Care



Documents
de référence
et liens utiles


Mölnlycke®