

## PATIENT DE 85 ANS

- Présentant un ulcère mixte sur le gros orteil évoluant depuis 14 semaines

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- Dénutrition

## PROTOCOLE DE SOINS




Mepilex® Border Flex Carré OU Mepilex® Border Flex Oval



Renouvellement tous les 2 jours en moyenne

## EVOLUTION DE LA PLAIE

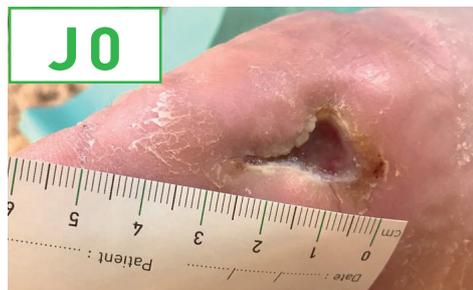

J0

- Surface initiale de 2 cm<sup>2</sup>
- Plaie 100% bourgeonnante
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Peau périlésionnelle saine
- Niveau d'exsudat faible



J17

- Réduction de la surface de 80% (0.4 cm<sup>2</sup>)
- Plaie en phase d'épidermisation
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat



J27

- Plaie résiduelle de 0.06 cm<sup>2</sup>
- Peau périlésionnelle saine
- Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex carré
- Cicatrisation complète 2 jours plus tard

## ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur cliniquement significative lors des renouvellements des pansements (EVA <15 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré et Oval se conforment bien à la plaie, sont faciles à manipuler et ont une bonne capacité à rester en place. Aucun signe de macération ou d'adhérence du pansement au lit de la plaie n'a été notifié.